



Manual Alfa Kørestole

Pegasus-Mobility
A/S

Nørregade 7
5450 Otterup
Telefon 70 27 27 18



Alfa 56 Baghjulstrukken



Alfa 28 Forhjulstrukken



Alfa 10 Baghjulstrukken

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
1. Generelle informationer.....	4
1.1. Før du benytter din Alfa Kørestol.	4
2. Kørsel med din Alfa Kørestol.....	5
2.1. Før start.....	5
2.2. Sikkerhedsselen	5
2.3. Start og kørsel af kørestolen.....	5
3. Kom godt i gang.....	6
3.1. Tips til sikker kørsel.	7
4. Alfa elektrisk kørestol i detaljer.	8
5. Termosikring	9
5.1. Termosikring er på Alfa 56.....	9
5.2. Termosikring er på Alfa 10 og 28	9
6. Opladning.....	9
6.1. Opladning af Alfa 10 og 28	10
6.2. Opladning af Alfa 56	10
6.3. Batterimåler på Alfa 10 og 28.....	11
6.4. Efter opladning.....	11
7. Joystick gammel version	12
8. Justeringer.....	13
8.1. Sæde på Alfa 56	13
8.2. Sæde på Alfa 10 og 28	13
8.3. Hovedstøtte - indstilling.....	13
8.4. Armlæn	13
8.5. Kontrolpanel med joystick	14
9. Frakobling af elektrisk bremse	14
10. Fodplade.....	14
11. Vedligeholdelse	15
11.1. Dæktryk	15
11.2. Dækskade/slitage	15
11.3. Bagaksel.....	15
11.4. Elektriske installationer	15
11.5. Maskinen	15
11.6. Sæde	15
12. Generel vedligeholdelse	16
12.1. Rengøring.....	16
12.2. Vedligeholdelse af sæde.....	16
12.3. Vedligeholdelse af specielle dele	16

12.4. Tekniske specifikationer Alfa 10 og 28.....	17
12.5. Teknisk specification Alfa 56.....	18
13. Fejlindikator	19
13.1. Andre problemer	20
14. Reklamationsbetingelser	21
15. Serviceaftale.....	22
19. Godkendt efter medicinsk direktiv.....	23

1. Generelle informationer

1.1. Før du benytter din Alfa Kørestol.

Tillykke med dit valg af en ALFA kørestol.

For at du får mest glæde af din nye Alfa Kørestol, opfordrer vi dig til at læse denne brugervejledning grundigt igennem.

Brugervejledningen omfatter Alfa 10, 28 og 56 elektriske kørestole leveret af Pegasus-Elscooter og indeholder vigtig information om vedligeholdelse af din ALFA kørestol samt alle dens funktioner.

Den indeholder også nyttifulde informationer om sikkerhed og vedligeholdelse for at opretholde kørestolens sikkerhed.

Vi ønsker dig god oplevelse.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte:

Pegasus-Elscooter på 70 77 27 18

2. Kørsel med din Alfa Kørestol

Før du tager den første tur i din nye kørestol, så vær sikker på at stolen står på en jævn overflade uden forhindringer. Kørestolen er beregnet til at køre selv i bakket terræn, men øv dig på fladt område.

2.1. Før start

Kontroller at frihjulshåndtaget er på D (Drive = Kør)



2.2. Sikkerhedsselen

Sæt dig i stolen og spænd sikkerhedsselen. Dette gøres ved at sætte knap A ind i knap B. For at løsne sikkerhedsselen trykkes på knap C og knap A løsnes igen.

Det er ikke et lovkrav at benytte selen, og mange vælger at få den afmonteret.



2.3 Start og kørsel af kørestolen

Når on/off knappen på joysticket tændes, vil alle lys i batteriindikatoren tænde og lyse konstant. Lysene skal ikke blinke. Start med at køre på laveste hastighed. Her vil lyset kun lyse i venstre side tæt på skildpadden. Sæt ikke hastigheden længere over mod haren (højere hastighed) før du føler dig tryk ved kørsel på kørestolen. Se desuden afsnit 7 side 12 omkring joysticket.



Når du hviler armen på armlænet, skal joysticket være nemt tilgængeligt. Når du bevæger joysticket lidt fremad, bevæger stolen sig lidt fremad. Når du bevæger joysticket helt fremad, vil stolen køre med almindelig fart. Farten kan justeres op og ned på hastighedsvælgeren. Med joysticket kan stolen også drejes 360 grader. Når joysticket slippes og går i neutral position midt i, stopper stolen.

Når batteriindikationen kun lyser på nogle få felter, skal du sørge for at oplade igen snart.

Hvis kørestolen pludselig skulle stoppe og ikke virker, så tryk ind på strømafbryderen bag på kørestolen.



Når du er færdig med at køre på stolen, sluk for strømmen, før du står af. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at armlæn løftes op og afstigning sker sidelæns.

Advarsel: For at undgå ulykker og skader på kørestolen, ~~lad være med at rejse~~ dig op og stå på fodpladen.

Når du er færdig med at benytte kørestolen, sæt den til opladning med det samme. Se opladning af batterier på side 9 afsnit 6.

3. Kom godt i gang.

Når du skal lære din Alfa kørestol at kende, så start med at køre et sted uden forhindringer. Øv dig ved at køre på fladt terræn. Start langsomt og kør lidt frem og tilbage, drej nogle gange. Når du bliver mere dus med stolen, kan du øge farten ved at dreje på hastighedsregulatoren. Se desuden afsnit 7 side 12 omkring joysticket.

3.1. Tips til sikker kørsel.

- ALFA kørestol må kun køres af én person ad gangen.
- Maksimum tilladte vægt er 150 kg.
- Husk at slukke for kontakt ved af- og påstigning.
- Kør altid forsigtigt og vær opmærksom på andre, der benytter samme køreområde.
- Benyt fodgængerovergang, når det er muligt.
- Kør ikke på stigninger med mere end 12 graders hældning og vend forsigtigt i ujævnt terræn og bakker.
- Benyt lav hastighed ved drejning.
- Vær opmærksom og benyt altid lav hastighed når der bakkес, køres ned af bakke og ved ujævnt terræn.
- Sæt aldrig kørestolen i N (frakobling af magnetbremse) ujævnt terræn og bakker.
- Efter kørsel i regnvejr, skal kørestolen stilles i tørvejr.
- Følg færdselsreglerne, når du færdes udendørs.

DETTE ER YDERST VIGTIGT AF HENSYN TIL DIN EGEN SIKKERHED.

4. Alfa elektrisk kørestol i detaljer.

Justerbart luksussæde og hovedstøtte.

Joystick

Armstøtte

Sikkerhedssele

Sædedæksel
(Kun på Alfa 56)

Sidereflekser

Justerbar fodplade



Ryglomme

Frakobling af magnetbremse

Reflekser bag

Anti-tip ordning
(Ikke på Alfa 28)



5. Termosikring

Din nye kørestol er forsynet med en termosikring, som beskytter motoren mod overbelastning. Sikringen er en springsikring, som springer ud, hvis motoren er overbelastet. Hvis sikringen slår fra, kan kørestolen ikke køre. Vent 1-2 min og tryk derefter sikringen ind, og du vil kunne køre igen. Sikringen er placeret forskelligt, afhængigt af model. Herunder er vist, hvor sikringen er placeret på netop din model.

5.1. Termosikring er på Alfa 56

placeret under sædedækslet



5.2. Termosikring er på Alfa 10 og 28

placeret under sædedækslet

Termosikring er på Alfa 10 og 28
placeret bag på kørestolen



6. Opladning.

Din ALFA kørestol er udstyret med 2 forseglede, vedligeholdelsesfri 12 Volt / 33-45 Ampere genopladelige batterier samt 1 stk. 24 Volt 5 Ampere oplader. Batterierne skal oplades, før du benytter din ALFA første gang og skal altid sættes til opladning efter dagens brug.

Vær sikker på, at kørestolen er slukket ved opladning.

6.1. Opladning af Alfa 10 og 28

På Alfa 10 og 28 er opladeren indbygget i kørestolen. Derfor skal den medfølgende ledning bare tilsluttes fra kørestolens bagside til et 220V strømudtag.



6.2. Opladning af Alfa 56

På Alfa 56 er opladeren placeret i kørestolens lille rum under sædet bagpå, hvorfra den let kan tages ud. Opladeren skal tilsluttes på joystickets side og i et 220V strømudtag.


Sæt stikket i 220V i væggen og derefter i scooteren. Laderne summer og dioderne lyser. Da laderne kan være forskellige, kan vi ikke sige præcis hvordan din lader reagere, læs på laderen. Fælles for alle er, at de selv slår fra. Når el stolen er opladet. Opladetiden afhænger af batteriernes tilstand samt hvor meget, der er kørt på dem siden sidste gang. Batterier er sliddele, som man med tiden må forvente skal udskiftes. Batteriernes levetid afhænger dels af brugen, din vægt og terrænet du kører i.



6.3. Batterimåler på Alfa 10 og 28

På bagsiden af din Alfa 10 eller 28 findes en batterimåler.

Batterimåleren benyttes til at finde ud af, hvor meget opladning, der er brug for. Når laderen er varmet op, vil måleren kunne flytte sig op til tre ampere og så lavt som nul ampere i perioder, hvilket er et tegn på, at opladning er i gang.

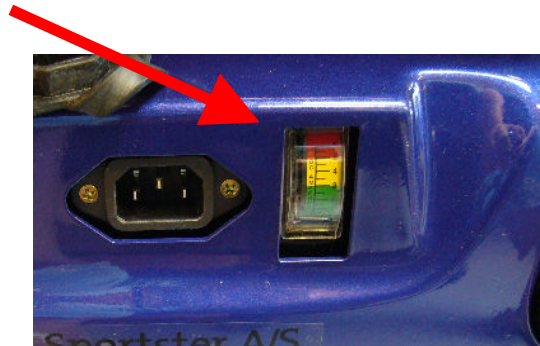

Batterimålerens nål vil give udslag på 0-mærket når batterierne er genopladet og klar til brug igen.

6.4. Efter opladning

Når batterierne er opladet igen, tages stikket igen ud af væggen og af kørestolen. Opladerledningen samt oplader på Alfa 56 skal opbevares sikkert og tørt, indtil de skal benyttes igen.

Hvis din stol er opladet efter 8-14 timer og ikke fungerer, så check:

- Sikringen ikke er gået
- At strømmen på kørestol ikke er slukket
- At strømafbryder er trykket ind
- Hvis det ikke er noget af ovennævnte, kontakt din forhandler

Husk venligst følgende:

1. Hvis kørestolen ikke benyttes i nogen tid, skal du være sikker på, at den er fuldt opladet. Når kørestolen igen tages i brug skal den oplades på ny.
2. Batterierne vil kun give maksimal udbytte, når kørestolen har været i brug og batterierne har været opladet op til 10 gange. Det er i princippet det samme som at køre i en ny bil.

Bemærk: Opladningstiden vil afhænge af, hvor lidt strøm, der er tilbage på batterierne. Konstant opladning har ingen betydning for batterierne. De kan ikke lades for meget.

7. Joystick gammel version

Stik til opladning – foran på joysticket.

Indikatorer for batteritilstand og selvdiagnosticerende advarslamper. Når kun de 2 sidste røde lamper lyser, skal kørestolen oplades snarest. Advarslamperne blinker, når der er fejl på kørestolen. Se afsnit 13.

On/off knap
Tænder og slukker kørestolen.

Horn

Hastighedsregulator
Lav hastighed er symboliseret ved en skildpadde i venstre side – tryk her for at sænke hastigheden.
Høj hastighed er symboliseret ved en hare i højre Side – tryk her for at øge hastigheden.

Joystick



8. Justeringer

8.1. Sæde på Alfa 56

Indstilling af vinkel på sæde.

Løft stangen op for at justere ryglænets vinkel.




8.2. Sæde på Alfa 10 og 28

Indstilling af vinkel på ryglænet kan ske ved at skrue på de 2 store skruer bag på sædet. Skruerne stilles, så ryglænet har en passende vinkel til den enkelte bruger af køretøjet.



8.3. Hovedstøtte - indstilling


Hovedstøttens højde kan reguleres ved at presse på den sorte knap ved hovedstøttens venstre side. Nu kan højden på hovedstøtten reguleres.

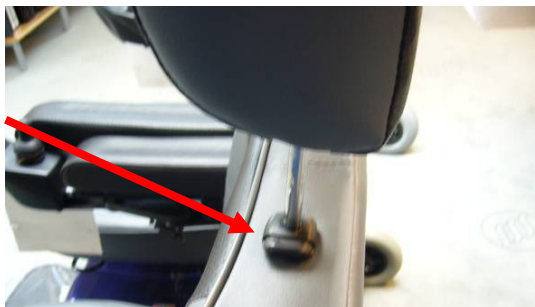

8.4. Armlæn

Armlæn kan justeres i bredden.

For at flytte armlæn løsnes trekantet skrue ved sæderammen bag på sædet.

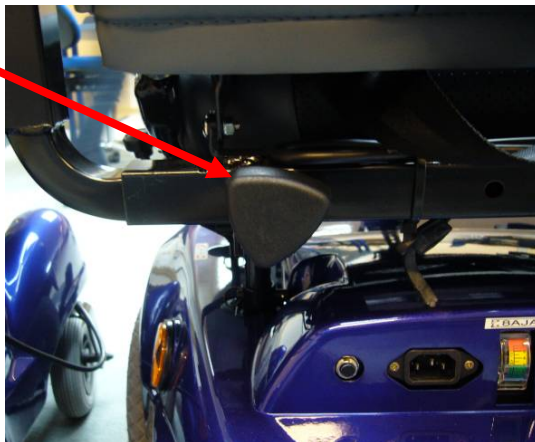

8.5. Kontrolpanel med joystick

Kontrolpanelet med joystick er placeret på en svingbar arm, der kan placeres i flere vinkler, uden brug af værktøj.

Dette betyder blandt andet, at kører man ind til et bord, kan armen svinges helt tilbage, så det er muligt at komme delvis ind under bordet med kørestolen.



9. Frakobling af elektrisk bremse

Din nye kørestol er forsynet med en elektrisk bremse, der gør, at du ikke kan skubbe med kørestolen.

Denne bremse kan kobles fra. Håndtaget er placeret på venstre side på kørestolen under sædet.

Håndtaget skal altid stå i position D for at kørestolen kan køre.


Når håndtaget er i positionen N (neutral), kan kørestolen flyttes uden at være tændt. Når håndtaget er i positionen D (kør), kan kørestolen køres.



10. Fodplade

Fodpladen kan justeres i højde og vinkel.

Skruerne løsnes og fodpladen justeres.

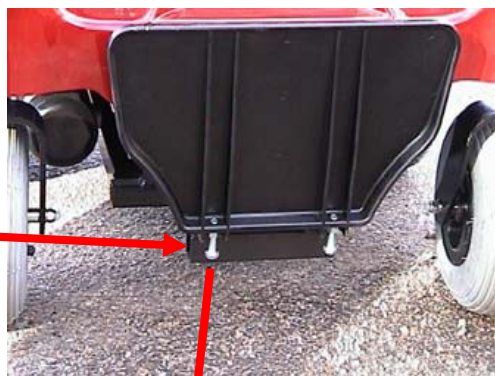

11. Vedligeholdelse

Al teknisk vedligeholdelse og reparation af din ALFA kørestol skal udføres af den autoriserede forhandler. Se desuden udkast til serviceaftale afsnit **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.** side **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.** i denne brugermanual. Følgende områder kræver nødvendig periodisk eftersyn:

11.1. Dæktryk

Betingelserne for dækkene og vedligeholdelse af det specificerede dæktryk har ikke kun indflydelse på dækkenes holdbarhed men også i høj grad på køresikkerheden. Ukorrekt dæktryk er ofte grund til dækproblemer. Det anbefalede dæktryk er 38 psi.

11.2. Dækskade/slitage

Undersøg regelmæssigt dækkene for skader. Dette gælder både for fremmedlegemer, såsom sten og lign. samt for uregelmæssig slid. Dækmønster må ikke komme under 1 mm.

11.3. Bagaksel

Hvis bagakslen er slidt, anbefales det at udskifte den.

11.4. Elektriske installationer

Alle stik skal være fast tilsluttet. Hvis ledninger eller forbindelser er ætset/tæret, skal disse udskiftes. Venligst kontakt din serviceforhandler.

11.5. Maskinen

Kontroller at alle beslag er funktionelle og sikre. Udskift eventuelt manglende beslag og stram løse beslag.

11.6. Sæde

Sædet skal nemt kunne flyttes. Hvis ikke det er tilfældet, kontroller, at lukkesystemet på bundrammen til sædet virker korrekt. Er dette ikke tilfældet, skal det rengøres med en korthåret børste, men ikke smøres.

12. Generel vedligeholdelse

Venligst overhold følgende instruktioner. De er med til at sikre, at din ALFA kørestol får optimal levetid.

12.1. Rengøring

ALFA kørestol skal rengøres med en fugtig klud eller med let sæbevand. På grund af de elektriske installationer, må der ikke benyttes rindende vand.

12.2. Vedligeholdelse af sæde

Materialet, der er benyttet til sædet, er af høj kvalitet og vil holde i mange år, hvis det bliver behandlet korrekt. Regelmæssig rengøring er nødvendig, da støv og snavs under kørsel, kan forårsage stor slitage og føre til, at materialet bliver skrøbeligt. Derfor opfordrer vi dig til at børste sædet af med en klud regelmæssigt.

12.3. Vedligeholdelse af specielle dele

Fælgene skal behandles med et egnet rengøringsmiddel specielt i vintermånederne. Brug ikke stærke kemiske rengøringsmidler og heller ikke dampstråle på mere end 60 grader.

Sædebælte skal kun rengøres med klud opvredet i mildt sæbevand (uden at flytte den fra kørestolen). Må ikke renses og der må ikke benyttes nogen form for kemiske produkter, da materialet derved vil blive dårligt.

Opbevaring. Mellem brug af kørestolen er det bedst at opbevare den, så den ikke udsættes for vand.

12.4. Tekniske specifikationer Alfa 10 og 28

	Alfa 10	Alfa 28
Længde	953 mm	1055 mm
Bredde	590 mm	585 mm
Højde	1020 mm	1060 mm
Hjul, for	175 mm	130 mm
Hjul, midt		260 mm
Hjul, bag	260 mm	190 mm
Vægt med batterier	80,2 kg	93,5 kg
Max.hastighed	Op til 6,5 km/t	Op til 6,5 km/t
Max brugervægt	135 kg	135 kg
Frihøjde	60 mm	65 mm
Stigningsmuligheder	8° - 40 mm	8° - 40 mm
Drejeradius	805 mm	570 mm
Bremse	Elektro-mekanisk	Elektro-mekanisk
Sæde	Sæde med indstillige nakkestøtte og sikkerhedssele	Sæde med indstillige nakkestøtte og sikkerhedssele
Drivkraft	2 motorer baghjulsdrift 420 W (0.5 hk), hver med 4.600 opm	2 motorer baghjulsdrift 420 W (0.5 hk), hver med 4.600 opm
Sædebredde	460 mm	490 mm
Batterier	2 stk. 12 v, 36 Ah og op til 40 km pr. opladning	2 stk. 12 v, 36 Ah og op til 40 km pr. opladning
Oplader	5A indbygget på stol	5A indbygget på stol
Elektronik	On/off kontakt Indikation for batteriniveau Hastighedskontrolknop 60 amp Dynamic Shark Controller Shark Joystick	On/off kontakt Indikation for batteriniveau Hastighedskontrolknop 60 amp Dynamic Shark Controller Shark Joystick

12.5. Teknisk specification Alfa 56

Frihøjde	85 mm.
Bredde	635 mm
Højde	1185 mm
Længde	1135 mm
Hjul – for	230 mm
Hjul – bag	360 mm
Drejeradius	56,9 cm
Vægt med batterier	101,8 kg
Vægt max. person	181 kg
Sædebredde	500 mm
Hastighed max.	8,0 km/t
Rækkevidde	Op til 40 km pr. opladning
Motorstørrelse	650 W
Stigningsgrad	8° / 12,5 % - 50 mm
Batterier	2 x 50 Amp. vedligeholdelsesfri
Oplader	24V / 5A
Bremsesystem	Motorbremse og automatisk el-magnetbremse
Signal	Horn
Elektronik	Programmerbar elektronikboks og batteriindikator

13. Fejlindikator

Opstår der en fejl på din kørestol, vil fejlindikatoren blinke, og kørestolen vil i nogle tilfælde ikke kunne køre. Fejlindikatoren vil blinke, når du drejer nøglen til ON. Herunder beskrives nogle af de fejl, som kan opstå, samt mulige løsninger på problemet.

Antal dioder der blinker	Fejlbeskrivelse	Hvad skal jeg gøre
1	Joystick ikke i neutral - brugerfejl	Giv slip for Joysticket og kontroller, at den vender tilbage til neutral position.
2	Batterifejl	Kontroller batteriernes og forbindelseskablernes tilstand. Oplad batterierne i minimum 8 timer. Det er måske nødvendigt at udskifte batterierne
3	Fejl på venstre motor	Kontroller venstre motor, forbindelseskablernes tilstand. Afmonter og monter kablerne til kontrolboksen.
4	Fejl på højre motor	Kontroller højre motor, forbindelseskablernes tilstand. Afmonter og monter kablerne til kontrolboksen.
5	Fejl på venstre parkeringsbremse	Kontroller parkeringsbremse, forbindelser og kabler. Flyt frikoblingshåndtaget fra "N" til "D".
6	Fejl på højre parkeringsbremse	Kontroller parkeringsbremse, forbindelser og kabler. Flyt frikoblingshåndtaget fra "N" til "D".
7	Joystickfejl	Kontroller forbindelseskablernes tilstand.
8	Fejl ved kontrolboksen	Kontroller forbindelseskablernes tilstand ved kontrolboksen. Afmonter kablerne og forbind dem til kontrolboksen igen.
9	Kommunikation med joystick – fejl	Kontroller forbindelseskablerne fra joystick til kontrolboksens.
10	Ukendt fejl	Kontroller forbindelseskablernes tilstand Kontakt servicetekniker.
11	Inkompatibel joystick	Forkert type joystick benyttes. Kontroller at kontrolboksen er kompatibel med joysticket.
Blink kører fra højre til venstre og retur	Låst tilstand	Låses op ved at trykke på hornet 2 gange

13.1. Andre problemer

Kørestolen vil ikke bevæge sig, selvom stolen er tændt.

Kontroller batteriindikatoren på joysticket. Alle dioder skulle være tændt. Kontroller det selvdiagnosticerende advarselslys. Det skal være konstant. Hvis det blinker, kan problemet identificeres

Kontroller alle elektriske forbindelser for at være sikker på, at de er forbundet korrekt.

Hvis ingen af disse forslag retter problemet, skal en servicetekniker kontaktes. Tæl hvor mange gange displayet blinker, når kørestolen er tændt.

Find kørestolens stelnummer. Nummeret er placeret bag på kørestolen på et klistermærke, samt foran i denne brugervejledning, se side 1.

Bemærk venligst at din Alfa kørestol er udstyret med en kontrolboks, som konstant kontrollerer køresystemet for at give dig en sikker og god tur. Hvis der opstår en fejl, vil batteriniveauindikatoren give dig en indikation af problemet ved hjælp af blinkende lys.

Servicetekniker kontaktes på tlf. nr.

70 27 27 18

14. Reklamationsbetingelser

Der er 24 måneders reklamationsret jævnfør dansk lovgivning.

Denne reklamationsret omfatter **ikke**:

- Omkostninger vedrørende transport til og fra Pegasus-Elscooter.
- Skader som følge af brug, der er i strid med leverandørens instruktioner.
- Skader som følge af unormal brug.
- Skader som følge af overlast og anden form for vold mod kørestolen.
- Skader som skyldes forsømmelse, forkert eller mangelfuld vedligeholdelse.
- Ulykkestilfælde.
- Sliddele. Det er dæk, slanger, batterier og potentiometer.
- Skader som følge af ændringer/reparationer, der er udført af andre end Pegasus-Elscooter.
- Hvis stelnummeret er ændret eller fjernet.

15. Serviceaftale

Pegasus Elscooter anbefaler, at du tilkøber en drifts- og serviceaftale, som omfatter et årlig eftersyn, som du selv bestiller.

Eftersynet vil omfatte følgende punkter:

3. Kontrol af dæktryk.
4. Kontrol af dækslid.
5. Kontrol og rengøring af bremse.
6. Kontrol og rengøring af magnetbremse.
7. Kontrol og efterspænding af kul i motor.
8. Hjul afmonteres og smøres.
9. Kontrol af sædebeslag.
10. Kontrol af Joystick.
11. Kontrol af alle elektriske funktioner med programmør.
12. Kontrol af alle ledningssamlinger.
13. Kontrol og måling af batterier.
14. Prøvekørsel.

Ring og forhør om pris.

19. Godkendt efter medicinsk direktiv



CHIEN TI ENTERPRISE CO., LTD.

No. 13, Lane 227, Fu Ying Rd., Hsin Chuang District., New Taipei City, Taiwan
Tel : +886-2-2903-2987 Fax : +886-2-2904-1170 • 2903-8807
E-Mail : sales@chienti.com.tw http://www.chienti.com.tw

Declaration of Conformity

MANUFACTURER		
Name of Company	Address	SRN
Chien Ti Enterprise Co., Ltd.	No. 13, Lane 227, Fu Ying Rd., Hsin Chuang District, New Taipei City, Taiwan	TW-MF-000001535

AUTHORIZED REPRESENTATIVE		
Name of Company	Address	SRN
MedNet EC-REP GmbH	Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany	DE-AR-000000002

PRODUCT IDENTIFICATION		
Product Name	Product Code / Catalog Number	Basic UDI-DI
CTM Power Chair	HS-5600 B-4220/X	0850017490HS-5600P4
Intended Purpose	Photo	
The CTM Power Chair Family provides a means by which a disabled occupant i.e. a disabled person or a person not having the full capacity to walk unaided to have mobility and the freedom to travel.		

RISK CLASS FOR MEDICAL DEVICES	
Device Classification	Common Specifications
Class 1 Rule 13	EN 12184:2014

Chien Ti Enterprise Co., Ltd. declares that the above-mentioned products meet the provision of the following legislation:

MDR (EU) 2017/745 and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Route to conformance - Class I self-certified device follow Annex II and Annex III under the MDR

Chien Ti Enterprise Co., Ltd. is exclusively responsible for the declaration of conformity.

COMPANY REPRESENTATIVE: Vivian Lo

TITLE: Sales Director

SIGNATURE:

PLACE: Taipei, Taiwan

DATE: 12/6/2022

**CHIEN TI ENTERPRISE CO., LTD.**

No. 13, Lane 227, Fu Ying Rd., Hsin Chuang District., New Taipei City, Taiwan
Tel : +886-2-2903-2987 Fax : +886-2-2904-1170 • 2903-8807
E-Mail : sales@chienti.com.tw http://www.chienti.com.tw

Declaration of Conformity

MANUFACTURER		
Name of Company	Address	SRN
Chien Ti Enterprise Co., Ltd.	No. 13, Lane 227, Fu Ying Rd., Hsin Chuang District, New Taipei City, Taiwan	TW-MF-000001535

AUTHORIZED REPRESENTATIVE		
Name of Company	Address	SRN
MedNet EC-REP GmbH	Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany	DE-AR-000000002

PRODUCT IDENTIFICATION		
Product Name	Product Code / Catalog Number	Basic UDI-DI
CTM Power Chair	HS-2800	0850017490HS-2800NR
Intended Purpose	Photo	
The CTM Power Chair Family provides a means by which a disabled occupant i.e. a disabled person or a person not having the full capacity to walk unaided to have mobility and the freedom to travel.		

RISK CLASS FOR MEDICAL DEVICES	
Device Classification	Common Specifications
Class 1 Rule 13	EN 12184:2014

Chien Ti Enterprise Co., Ltd. declares that the above-mentioned products meet the provision of the following legislation:

MDR (EU) 2017/745 and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Route to conformance - Class I self-certified device follow Annex II and Annex III under the MDR

Chien Ti Enterprise Co., Ltd. is exclusively responsible for the declaration of conformity.

COMPANY REPRESENTATIVE: Vivian Lo

TITLE: Sales Director

SIGNATURE:

PLACE: Taipei, Taiwan

DATE: 12/6/2022

**CHIEN TI ENTERPRISE CO., LTD.**

No. 13, Lane 227, Fu Ying Rd., Hsin Chuang District., New Taipei City, Taiwan
Tel : +886-2-2903-2987 Fax : +886-2-2904-1170 • 2903-8807
E-Mail : sales@chienti.com.tw http://www.chienti.com.tw

Declaration of Conformity

MANUFACTURER		
Name of Company	Address	SRN
Chien Ti Enterprise Co., Ltd.	No. 13, Lane 227, Fu Ying Rd., Hsin Chuang District, New Taipei City, Taiwan	TW-MF-000001535

AUTHORIZED REPRESENTATIVE		
Name of Company	Address	SRN
MedNet EC-REP GmbH	Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany	DE-AR-000000002

PRODUCT IDENTIFICATION		
Product Name	Product Code / Catalog Number	Basic UDI-DI
CTM Power Chair	HS-1000	0850017490HS-1000MA
Intended Purpose	Photo	
The CTM Power Chair Family provides a means by which a disabled occupant i.e. a disabled person or a person not having the full capacity to walk unaided to have mobility and the freedom to travel.		

RISK CLASS FOR MEDICAL DEVICES	
Device Classification	Common Specifications
Class 1 Rule 13	EN 12184:2014

Chien Ti Enterprise Co., Ltd. declares that the above-mentioned products meet the provision of the following legislation:

MDR (EU) 2017/745 and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Route to conformance - Class I self-certified device follow Annex II and Annex III under the MDR

Chien Ti Enterprise Co., Ltd. is exclusively responsible for the declaration of conformity.

COMPANY REPRESENTATIVE: Vivian Lo

TITLE: Sales Director

SIGNATURE:

PLACE: Taipei, Taiwan

DATE: 12/6/2022